

seni

Rundumversorgung bei Inkontinenz





Rundumversorgung bei Inkontinenz

Inhaltsverzeichnis Seite

Was ist Blasenschwäche?	2
Eigenschaften der Inkontinenzprodukte von SENI	3
Seni Lady	4
Seni Man	6
San Seni	8
San Seni Alvi	10
Seni Fix	11
Seni Optima	12
Seni Active	14
Super Seni	16
Seni Kids	20
Seni Soft Super Dry	22
Seni Soft	23
Seni Care	24
Seni Care UREA	30
SeniControl App	31
Richtige Produktwahl	32
Anlegetechnik der Seni-Produkte	34
Sortimentsübersicht	36

Was ist Blasenschwäche?

Blasenschwäche bezeichnet eine Funktionsstörung der Blase, bei der es zu einem unwillkürlichen Harnverlust kommt.

Allgemein wird oft angenommen, Blasenschwäche trete nur bei älteren Menschen auf und betreffe lediglich Frauen. Beides ist falsch. Die Symptomatik einer Inkontinenz kann bei Menschen in jedem Alter auftreten, sowie beide Geschlechter betreffen. Die Zahl der Betroffenen liegt in Deutschland bei etwa sechs Millionen; inklusive Dunkelziffer wird sie sogar auf neun Millionen geschätzt.

Blasenschwäche ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Begleiterscheinung oder Folgeerkrankung. Verschiedene Faktoren können diese auslösen oder fördern. Die häufigsten allgemeinen Ursachen einer Inkontinenz sind Schwächung der Becken- oder Blasenmuskulatur, Blasen- und Harnwegsentzündungen und starkes Übergewicht. Geschlechterspezifisch können bei Frauen Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre Inkontinenz auslösen, bei Männern Prostatavergrößerung. Weniger häufig sind schwere Erkrankungen die Ursache, darunter fallen Tumore, Verletzungen im Gehirn oder Rückenmark, Alzheimer, Parkinson, Diabetes oder psychische Störungen. Inkontinenz kann auch infolge von chirurgischen Eingriffen oder Medikamenteneinnahme auftreten. Für eine richtige Behandlung ist es von elementarer Wichtigkeit, durch Untersuchungen herauszufinden, welche Ursache vorliegt.

**Inkontinenz ist keine reine Alterserkrankung.
Sie ist weit verbreitet und kann jeden betreffen!**

Abstufungen

Neben den unterschiedlichen Formen tritt Blasenschwäche auch in verschiedenen Schweregraden auf. Man unterscheidet diese gemäß der Menge des unkontrollierten Harnverlustes. Um die richtige Behandlung und die optimalen Hilfsprodukte für die jeweilige Stufe zu wählen, dient folgende Einstufung zur Orientierung:

INKONTINENZSTUFE	LEICHT	MITTEL	SCHWER
Urinmenge, die unkontrolliert innerhalb von 4 Stunden ausgeschieden wurde	 BIS 100 ml	 100-200 ml	 ÜBER 200 ml

Eigenschaften der Inkontinenzprodukte von SENI



Atmungsaktiv – die Luft kann zirkulieren

Die Außenseite der SENI Produkte aus einem speziellen, dampfdurchlässigen Material lässt die Haut frei atmen, hält die Flüssigkeit aber sicher im Inneren des Produktes.



Ein angenehm trockenes Gefühl

Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit im den Saugkern und für ein angenehm trockenes Gefühl.



Diskretion und Komfort

Die besonders weiche und sanfte Außenseite ist absolut geräuschneutral und bietet so Diskretion und Tragekomfort.



Verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen

Odour Stop ist eine Bezeichnung für die Eigenschaft des in den Inkontinenzprodukten verwendeten Superabsorbers, der die Entstehung des unangenehmen Geruchs verhindert.



Das Risiko von Allergien wird minimiert

Produkte mit dieser Bezeichnung haben keine Latexelemente. Stattdessen wurde ein elastisches Garn verwendet. Dadurch wird das Risiko von Allergien minimiert. Die Produkte von SENI können ohne Bedenken von Personen verwendet werden, die gegen Latex allergisch sind.



Anatomische Passform


Die spezielle Form der Produkte von SENI ermöglicht eine optimale Anpassung an den Körper. So genießt der Betroffene die volle Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und Diskretion.



Seni Lady

Atmungsaktive Einlagen für Frauen

Leichte bis mittlere Inkontinenz

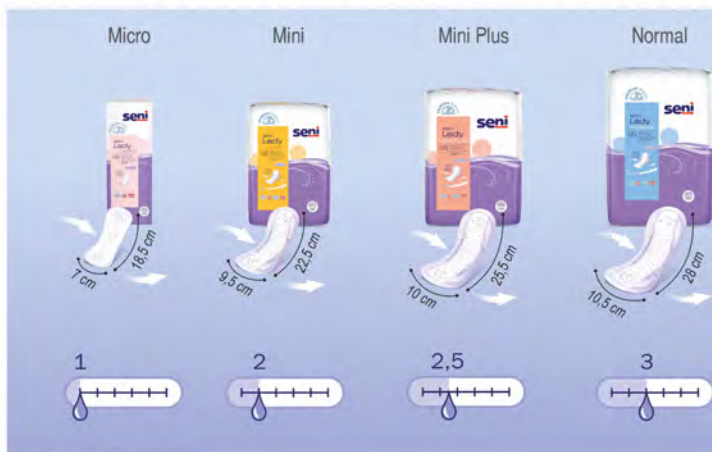

* nicht bei der Größe Micro

Premium Quality Versorgung

URO Protect



- ♦ flüssigkeitsabweisende Seitenbündchen* – schützen zuverlässig vor dem Auslaufen
- ♦ besondere Prägung auf der Oberfläche – visualisiert die anatomische Passform und sorgt für eine bessere Verteilung der Flüssigkeit
- ♦ weiche Oberfläche – mehr Diskretion und Tragekomfort
- ♦ Saugkissen mit Superabsorber – bietet einen zuverlässigeren Schutz als bei herkömmlichen Damenbinden und neutralisiert unangenehme Gerüche
- ♦ geräuschneutral – diskret und angenehm zu tragen
- ♦ einfache Handhabung und Fixierung in der Unterwäsche
- ♦ in 7 Größen erhältlich – passen sich individuell an die Bedürfnisse an



Extra

Super


Plus




4

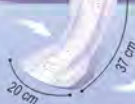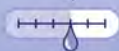

5

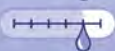

6

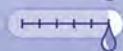

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
05385370	Micro	—	60 ml	7 x 18,5	16 x 20 Stk.
02582153	Mini	15.25.01.5125	230 ml	9,5 x 22,5	20 x 20 Stk.
07791163	Mini Plus	15.25.01.5307	300 ml	10 x 25,5	20 x 20 Stk.
02043108	Normal	15.25.01.5126	360 ml	10,5 x 28	20 x 20 Stk.
02043114	Extra	15.25.01.5127	430 ml	15 x 28	16 x 15 Stk.
02043137	Super	15.25.01.5128	790 ml	20 x 37	16 x 15 Stk.
03572174	Plus	15.25.01.5149	930 ml	21 x 42	16 x 15 Stk.




Seni Man


Atmungsaktive Einlagen für Männer

Leichte bis mittlere Inkontinenz

Normal

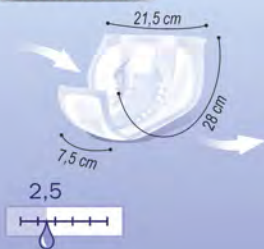

Extra

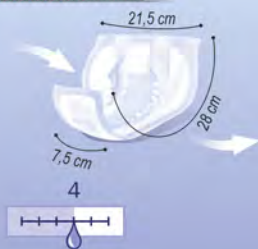

Premium Quality Versorgung



- ◆ anatomische Passform – perfekte Anpassung an den Körper
- ◆ Saugkissen mit Superabsorber – neutralisiert unangenehme Gerüche
- ◆ weich und geräuschneutral – diskret und angenehm zu tragen
- ◆ flüssigkeitsabweisende Seitenbündchen – schützen zuverlässig vor dem Auslaufen
- ◆ einfache Handhabung und Fixierung in der Unterwäsche
- ◆ in 3 Größen erhältlich – passen sich individuell an die Bedürfnisse an

Super



PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
11080858	Normal	15.25.01.5391	300 ml	7,5/21,5 x 28,5	8 x 15 Stk.
09508007	Extra	15.25.01.5319	400 ml	7,5/21,5 x 28,5	12 x 15 Stk.
03427650	Super	15.25.01.5266	820 ml	9 x 40	6 x 20 Stk.




San Seni

Atmungsaktive,
anatomisch geformte Vorlagen


Mittlere, schwere und sehr schwere Inkontinenz

Prima

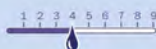

32,5 x 61 cm

Normal

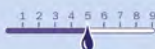


32 x 62,5 cm

Regular



37 x 69 cm

Uni

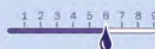


32 x 62,5 cm

* San Seni Prima verfügt über ein einfaches Saugkissen mit Superabsorber.

Premium Quality Versorgung



- ◆ anatomische Passform – perfekte Anpassung an den Körper
- ◆ doppeltes Saugkissen mit Superabsorber* – für ein angenehmes trockenes Gefühl und einen optimalen Geruchsschutz
- ◆ flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – für mehr Sicherheit
- ◆ doppelter Nässeindikator – gibt eine präzise Information darüber, ob das Produkt gewechselt werden muss
- ◆ offenes System ohne hüftumfassende Seitenflügel – garantiert volle Bewegungsfreiheit
- ◆ Fixierung mit Hilfe von speziellen, elastischen Höschen Seni Fix – ideale Anpassung an den Körper, auch bei Personen mit Übergewicht

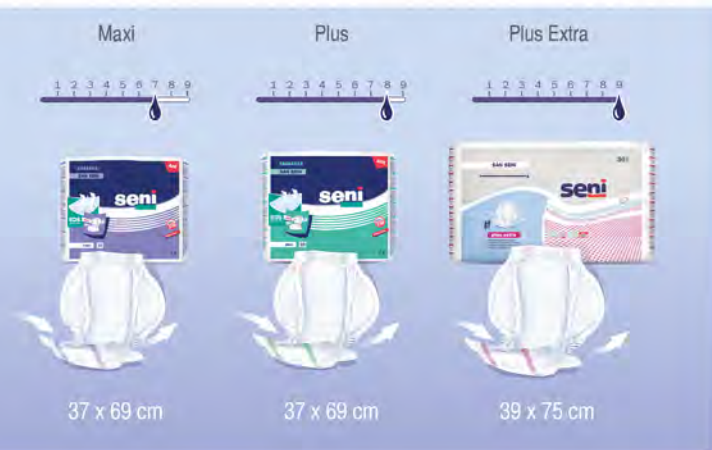

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
06077535	Prima (Gr.1)	15.25.01.0081	1100 ml	32,5 x 61	4 x 30 Stk.
03427383	Normal (Gr. 2)	15.25.01.1077	1290 ml	32 x 62,5	4 x 30 Stk.
07385109	Regular (Gr. 2)	15.25.01.1164	1500 ml	37 x 69	3 x 30 Stk.
03427503	Uni (Gr. 2)	15.25.01.1095	1700 ml	32 x 62,5	4 x 30 Stk.
03427578	Maxi (Gr. 3)	15.25.01.2082	2000 ml	37 x 69	3 x 30 Stk.
03427667	Plus (Gr. 3)	15.25.01.2100	2500 ml	37 x 69	3 x 30 Stk.
10835763	Plus Extra (Gr. 3+)	15.25.01.2215	3500 ml	39 x 75	3 x 30 Stk.



San Seni Alvi

Atmungsaktive Stuhlvorlagen

- ◆ große Fläche der Einlage und angepasste Saugkraft
– keine Überversorgung und somit Ersparnis für den Betroffenen
- ◆ flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – hält den Stuhl sicher in der Einlage
- ◆ ideal für Stuhlinkontinenz oder bei Personen mit einem Dauerkatheter

Achtung!

Produkt mit einem einfachen Saugkissen ohne Superabsorber – nicht geeignet als Schutz bei Harninkontinenz oder Diarrhö.



37 x 69 cm

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
08826567	Alvi	–	700 ml	37 x 69	6 x 30 Stk.



Seni Fix

Elastische Fixierhöschen

- ♦ elastische Höschen zur Fixierung von anatomisch geformten Vorlagen San Seni, größeren Einlagen Seni Lady sowie Stuhlvorlagen San Seni Alvi
- ♦ ideal bei Personen mit Übergewicht
- ♦ elastisch — optimale Anpassung an den Körper
- ♦ waschbar — ideal zum mehrmaligen Gebrauch
- ♦ latexfrei und so besonders hautfreundlich

Seni Fix Plus

PZN	Produkt	Bauchumfang in cm	Hilfsmittel-Nr.	Menge je Karton
10790919	Medium	70 - 95	15.25.02.0034	100 x 5 Stk.
10790931	Large	80 - 120	15.25.02.1032	100 x 5 Stk.
10790954	Extra Large	90 - 130	15.25.02.1032	100 x 5 Stk.
10791008	XXL	100 - 155	15.25.02.1032	100 x 5 Stk.



Seni Fix Panty

PZN	Produkt	Bauchumfang in cm	Hilfsmittel-Nr.	Menge je Karton
10790836	Medium	70 - 90	15.25.02.0018	100 x 5 Stk.
10790859	Large	85 - 110	15.25.02.0017	100 x 5 Stk.
10790871	Extra Large	105 - 130	15.25.02.0017	100 x 5 Stk.



Seni Fix Comfort

PZN	Produkt	Bauchumfang in cm	Hilfsmittel-Nr.	Menge je Karton
10790894	Small	65 - 100	15.25.02.0090	20 x 5 Stk.
10791020	Medium	70 - 110	15.25.02.0090	20 x 5 Stk.
10791043	Large	75 - 120	15.25.02.1100	20 x 5 Stk.
10791089	Extra Large	80 - 130	15.25.02.1100	20 x 5 Stk.
10791126	XXL	85 - 140	15.25.02.1100	20 x 5 Stk.
10790807	XXXL	125 - 165	-	20 x 5 Stk.





Seni Optima

Atmungsaktive Vorlagen mit Hüftbund

3 erhältliche Saugstärken:

♦ Seni Optima ♦ für mittlere bis schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
01681278	Medium	15.25.03.1298	2000 ml	70 - 105	8 x 10 Stk.
01681752	Large	15.25.03.2346	2200 ml	80 - 125	6 x 10 Stk.
01685891	Extra Large	—	2300 ml	105 - 155	6 x 10 Stk.

♦ Seni Optima Plus ♦ für schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
01687513	Medium	15.25.03.1299	2600 ml	70 - 105	8 x 10 Stk.
01689311	Large	15.25.03.2347	2800 ml	80 - 125	6 x 10 Stk.
01689340	Extra Large	15.25.03.2348	2900 ml	105 - 155	6 x 10 Stk.

♦ Seni Optima Trio ♦ für sehr schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
01689363	Medium	15.25.03.1300	3500 ml	70 - 105	8 x 10 Stk.
01691443	Large	15.25.03.2349	4200 ml	80 - 125	6 x 10 Stk.
01691489	Extra Large	15.25.03.2350	4200 ml	105 - 155	6 x 10 Stk.

Premium Quality Versorgung



- ◆ ein doppeltes Anpassungssystem:
 - regulierbarer, besonders weicher Hüftbund – für eine einfache Handhabung und perfekte Anpassung an den Körper
 - anatomische Passform sowie elastische Vorder- und Rückseiten für einen optimalen Sitz
- ◆ flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – für mehr Sicherheit
- ◆ doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – für ein angenehm trockenes Gefühl und einen optimalen Geruchsschutz
- ◆ doppelter Nässeindikator – informiert präzise über den Wechselbedarf
- ◆ ideal für aktive Menschen und beim Toilettentraining
- ◆ einfache Anlegetechnik – keine fremde Hilfe beim Anlegen notwendig





Bald im neuen
Verpackungsdesign

Seni Active

Atmungsaktive, elastische Inkontinenzslips

3 erhältliche Saugstärken:

♦ Seni Active Normal ♦ für mittlere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	min. Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
07229473	Small	15.25.03.0204	1100 ml	55 - 85	8 x 10 Stk.
07229757	Medium	—	1100 ml	80 - 110	8 x 10 Stk.
07230022	Large	—	1100 ml	100 - 135	8 x 10 Stk.
07230039	Extra Large	—	1100 ml	120 - 160	8 x 10 Stk.

♦ Seni Active ♦ für mittlere bis schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	min. Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
03295415	Small	15.25.03.0161	1200 ml	55 - 85	8 x 10 Stk.
03086640	Medium	15.25.03.1239	1400 ml	80 - 110	8 x 10 Stk.
03086551	Large	15.25.03.2259	1500 ml	100 - 135	8 x 10 Stk.
03901123	Extra Large	15.25.03.2378	1600 ml	120 - 160	8 x 10 Stk.

♦ Seni Active Plus ♦ für schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	min. Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
07227379	Small	15.25.03.0208	1900 ml	55 - 85	8 x 10 Stk.
07227468	Medium	15.25.03.1421	2000 ml	80 - 110	8 x 10 Stk.
07227474	Large	15.25.03.2521	2000 ml	100 - 135	8 x 10 Stk.
07228858	Extra Large	15.25.03.2522	2000 ml	120 - 160	8 x 10 Stk.

Premium Quality Versorgung



- ◆ wie gewöhnliche Unterwäsche an- und ausziehbar – Komfort und Diskretion
- ◆ aufreißbare Seitennähte – einfache Entsorgung des gebrauchten Produktes
- ◆ doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – für ein angenehmes trockenes Gefühl und einen optimalen Geruchsschutz
- ◆ flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – für mehr Sicherheit
- ◆ ideal für aktive Personen und beim Blasentraining
- ◆ Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf
- ◆ elastisch, weich und sanft – besonders hautfreundlich und angenehm zu tragen





Super Seni

Atmungsaktive Inkontinenzhosen

4 erhältliche Saugstärken:

♦ **Super Seni** ♦ für mittlere bis schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
03427153	Extra Small Gr. 0	15.25.03.0144	1400 ml	40 - 60	12 x 10 Stk.
01405532	Small Gr. 1	15.25.03.0069	1600 ml	55 - 80	12 x 10 Stk.
02043019					3 x 30 Stk.
01405526	Medium Gr. 2	15.25.03.1138	2300 ml	75 - 110	12 x 10 Stk.
02043031					4 x 30 Stk.
01405503	Large Gr. 3	15.25.03.2132	2600 ml	100 - 150	6 x 10 Stk.
02043982					4 x 30 Stk.
02599538	Extra Large Gr. 4	15.25.03.2213	2600 ml	130 - 170	6 x 10 Stk.
02599863					4 x 30 Stk.

Premium Quality Versorgung



- ◆ **Fit & Dry** – der neue, kompakte Saugkern sorgt für ein besonders trockenes Gefühl und passt sich optimal dem Körper an
- ◆ **Flexi 360°** – Tragekomfort und ein sicherer Schutz:
 - elastische **Tailleneinsätze** vorne und hinten
 - **doppelte Klebeklettverschlüsse** ermöglichen mehrmaliges Schließen und Öffnen der Inkontinenzhose ohne die Außenschicht zu beschädigen
- ◆ **doppeltes Saugkissen mit Superabsorber** – für ein angenehm trockenes Gefühl und einen optimalen Geruchsschutz
- ◆ **flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz** – für mehr Sicherheit und einen besonderen Tragekomfort
- ◆ **doppelter Nässeindikator** – informiert präzise über den Wechselbedarf



◇ Super Seni Plus • für schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
03427182	Extra Small Gr. 0	15.25.03.0145	1800 ml	40 - 60	12 x 10 Stk.
01405561	Small Gr. 1	15.25.03.0074	2100 ml	55 - 80	12 x 10 Stk.
01003667					3 x 30 Stk.
01405578	Medium Gr. 2	15.25.03.1159	2900 ml	75 - 100	8 x 10 Stk.
02599892					3 x 30 Stk.
01405584	Large Gr. 3	15.25.03.2158	3200 ml	100 - 150	6 x 10 Stk.
02599900					3 x 30 Stk.
02599857	Extra Large Gr. 4	15.25.03.2214	3200 ml	130 - 170	6 x 10 Stk.
01003673					3 x 30 Stk.


◇ Super Seni Trio • für sehr schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
00190986	Small Gr. 1	15.25.03.0146	2600 ml	55 - 80	12 x 10 Stk.
00190992	Medium Gr. 2	15.25.03.1203	3000 ml	75 - 110	8 x 10 Stk.
00191000	Large Gr. 3	15.25.03.2215	3400 ml	100 - 150	6 x 10 Stk.
00191253	Extra Large Gr. 4	15.25.03.2216	3400 ml	130 - 170	6 x 10 Stk.

◇ Super Seni Quatro • für besonders schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
11229007	Small Gr. 1	15.25.03.1459	2700 ml	55 - 80	12 x 10 Stk.
01985386	Medium Gr. 2	15.25.03.1405	3700 ml	75 - 110	8 x 10 Stk.
01986204	Large Gr. 3	15.25.03.2499	4000 ml	100 - 150	6 x 10 Stk.
01986701	Extra Large Gr. 4	15.25.03.2500	4000 ml	130 - 170	6 x 10 Stk.

Premium Quality Versorgung

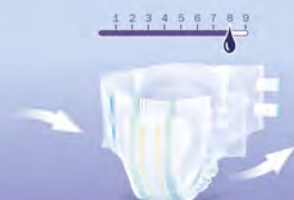



Seni Kids

Atmungsaktive Inkontinenzhosen für Kinder

Junior



Premium Quality Versorgung



- ◆ Atmungsaktive Inkontinenzhosen Seni Kids für Kinder, die unter Inkontinenz leiden und in die Erwachsenenprodukte noch nicht hereingewachsen sind
- ◆ ein doppeltes Anpassungssystem für volle Bewegungsfreiheit:
 - ein breiter, elastischer Rückenabschluss
 - elastische Klebeklettverschlüsse zum mehrmaligen Schließen und Öffnen
- ◆ Flüssigkeitsabweisende, seitliche Innenbündchen, die vor dem Auslaufen schützen – für ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit
- ◆ Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf

Junior Extra



◆ Seni Kids

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Körpergewicht	Menge je Karton
09532589	Junior	15.25.03.6001	930 ml	11 - 25 kg	5 x 30 Stk.
09532572	Junior Extra	15.25.03.6002	1100 ml	15 - 30 kg	5 x 30 Stk.



Seni Soft Super Dry

Atmungsaktive Bettschutzunterlagen

- ◆ Saugkissen aus Zellstofflocken und Superabsorber – hohe Saugstärke und ein besonders trockenes Gefühl
- ◆ eine optimale Geruchsbindung
- ◆ Unterseite aus atmungsaktivem Material – besonders hautfreundlich und rutschfest
- ◆ besonders weiche Vliesoberseite für ein angenehmes Gefühl auf der Haut



PZN	Größe (cm)	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Menge je Karton
11240210	90 x 60	–	2500 ml	4 x 15 Stk.



Seni Soft

Bettschutzunterlagen

- ◆ Saugkissen aus Zellstoffpulpe
- ◆ Oberseite aus weichem Vliesstoff — perfekter Liegekomfort
- ◆ Unterseite aus feuchtigkeitsundurchlässiger und rutschfester Folie

Seni Soft Super Dry und Seni Soft Bettschutzunterlagen helfen das Bett frisch und hygienisch sauber zu halten, besonders bei bettlägerigen Inkontinenten.



PZN	Größe (cm)	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 11948)	Menge je Karton
04188130	40 x 60	19.40.05.3054	850 ml	4 x 30 Stk.
04188147	60 x 60	19.40.05.4048	1400 ml	4 x 30 Stk.
04188153	90 x 60	19.40.05.5056	2000 ml	2 x 30 Stk.
09042738				1 x 50 Stk.
01913398	90 x 60 (+ Seitenflügel)	—	2000 ml	2 x 30 Stk.

Medizinische Hautpflege für anspruchsvolle Haut

Urin und Stuhl belasten die Haut von Inkontinenten.

Im Laufe der Jahre wird die Haut dünner, trockener und reagiert empfindlicher auf die Wirkung reizender Substanzen.

Sie verliert ihre natürliche Elastizität sowie Straffheit.

Zusätzlich kann die Schwächung des Hydrolipidmantels ein unangenehmes Spannungsgefühl verursachen. Die richtige Pflege kann die Beschwerden bei trockener und zu Reizungen neigender Haut mindern und sie wirksam vor unerwünschten Veränderungen schützen.

Denken Sie daran: Vorbeugen ist besser als Heilen!

Die Pflegeserie SENI Care wurde genau dafür entwickelt.

Dank der Verbindung der neuesten Technologie mit bewährten Rezepturen und speziell ausgewählten Aktivstoffen, wirken die Pflegeprodukte SENI Care sanft und effektiv ohne dabei den schützenden Hydrolipidmantel der Haut anzugreifen.

Die Pflegeserie SENI Care und die Hygieneprodukte aus dem Zusatzangebot garantieren eine umfassende und einfache Hautpflege bei Personen mit Inkontinenz.

Hautpflege

Sanfte Reinigung

EIGENSCHAFTEN DER PFLEGEPRODUKTE SENI CARE

BIOCOMPLEX
AUS LEINEN



pH 5

SINODOR®

Leinsamenextrakt mit einer
nährenden und lindernden
Wirkung

Dermatologically Tested –
sicher auch bei besonders
empfindlicher Haut

Ein neutraler und
hautfreundlicher pH-Wert

Substanz mit einer
geruchsneutralisierenden
Wirkung

Wirksamer Schutz

Regeneration

EFFECTIVE PROTECTION

seni
care

Body care cream
Schutzcreme
Crème protectrice pour le corps
Bőrvédő krém



REGENERATION
seni
care

Cream for dry
and calloused skin
Creme für trockene
und raue Haut
Crème pour peau
sèche et rugueuse
Crème voor de droge
en ruwe huid



10% UREA

DELICATE CLEANSING

seni
care



Creamy gel
Cremedusche
Gel douche crémeux
Tusolósszé

3% UREA

Q-3, Q-6, SILYMARIN



REGENERATION

seni
care

Moisturizing body emulsion for dry skin
Feuchtigkeitsspendende Körperemulsion
Émulsion fortement hydratante pour peau sèche
Hőstabilizáló testemulzió száraz bőrre

4% UREA

REHALOSE & ALLANTOIN



Sanfte Reinigung

- ◆ Produkte ohne Seifenzusatz
- ◆ ideal zur Reinigung von besonders empfindlicher und beanspruchter Haut
- ◆ die Haut wird sanft gereinigt, mit Nährstoffen versorgt und das Entzündungsrisiko minimiert



ANWENDUNG MIT WASSER



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
1	03816819	Rückfettende Waschlotion	500 ml	12 Stk.
2	10311014	Cremedusche (3 % UREA)	300 ml	12 Stk.
3	10310983	Feuchtigkeitsspendendes Shampoo (3 % UREA)	500 ml	12 Stk.



ANWENDUNG OHNE WASSER Ersatz für Reinigung mit Wasser und Seife



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
4	00190911	Hautreinigungs- und Pflegeschäum	500 ml	12 Stk.
5	10307780	Waschcreme 3 in 1 (3 % UREA)	1000 ml	6 Stk.
6	00603951	Feuchttücher (20 x 32 cm)	80 Stk.	8 Stk.
7	09101820	Feuchttücher SENSITIVE (20 x 32 cm)	68 Stk.	8 Stk.

Regeneration

- ◆ reichhaltige Pflege und langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung
- ◆ ideal bei anspruchsvoller Haut
- ◆ die natürlichen Regenerierungskräfte der Haut werden unterstützt



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
8	01913381	Regenerierender Pflegebalsam für trockene Haut	250 ml	12 Stk.
9	09108621	Feuchtigkeitspendende Körperemulsion (4 % UREA)	500 ml	12 Stk.
10	11174045	Pflegende Handcreme (3 % UREA)	75 ml	12 Stk.
11	11174051	Pflegende Fußcreme (7 % UREA)	75 ml	12 Stk.
12	00698905	Creme für trockene und raue Haut (10 % UREA)	100 ml	12 Stk.
13	00181728	Aktivierendes Gel mit Guarana	250 ml	12 Stk.
14	09101814	Pflegendes Körperöl	150 ml	12 Stk.

Wirksamer Schutz

- ◆ Präparate mit entzündungshemmender Wirkung
- ◆ **die Schutzcreme mit Zinkoxid** hinterlässt auf der Haut eine weiße Schutzschicht
- ◆ **die Schutzcreme mit Arginin** hinterlässt auf der Haut eine durchsichtige Schutzschicht



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
15	00603945	Schutzcreme mit Zinkoxid	200 ml	12 Stk.
16	00164931	Schutzcreme mit Arginin	200 ml	12 Stk.

Komfort der Pflege

Schutzservietten

Schutzservietten aus reißfestem Zellstofftissue. Ideal für die Nahrungsaufnahme, Gesichtspflege oder Rasur von Pflegebedürftigen.

Hygienetücher Air-Laid

Reißfeste und besonders sanfte Einweg-Tücher aus einem weichen Air-Laid-Stoff.

Einmal-Waschhandschuhe

Besonders weiche Waschhandschuhe für die täglichen Pflegetätigkeiten sind sanft zur Haut und einfach in der Handhabung. Die SENI Care Einmal-Waschhandschuhe sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- ♦ Einmal-Waschhandschuhe aus Zellstoff mit einer Folienbeschichtung im Inneren – Pflege ohne Wasser
- ♦ Einmal-Waschhandschuhe aus Vliesstoff ohne eine Folienbeschichtung im Inneren – Pflege mit Wasser



	PZN	Produkt	Inhalt / Größe	Menge je Karton
17	00603974	Schutzservietten mit Bindelaschen (40 cm x 60 cm)	100 Stk.	6 Stk.
18	05565563	Hygienetücher Air-Laid (36 cm x 32 cm)	30 Stk.	24 Stk.
19	00603968	Waschhandschuhe mit Folie	50 Stk.	18 Stk.
20	05565557	Waschhandschuhe ohne Folie	50 Stk.	12 Stk.

UREA

DER FEUCHTIGKEITSSPENDER BEI TROCKENER HAUT!

Feuchtigkeitsspendende
Körperemulsion

Creme für trockene
und raue Haut



Sehr trockene Haut braucht eine reichhaltige Pflege mit besonders viel Feuchtigkeit. Speziell für die Bedürfnisse trockener, empfindlicher und beanspruchter Haut wurde die Exklusiv Pflegeserie SENI Care UREA entwickelt.



Fragen Sie jetzt in der Apotheke oder im Sanitätshaus!



SeniControl App

Alles unter Kontrolle



Anna und Michael leiden unter Inkontinenz. Ihr Alltag wird zunehmend von der Blase bestimmt. Experten von SENI haben die optimale Lösung entwickelt: Eine App, die Anna und Michael diskret begleitet.

SeniControl App hilft Anna und Michael bei:

- der Bestimmung Ihrer Inkontinenzstufe
- der Wahl des geeigneten Produktes
- der Kontrolle der Ausgaben für Inkontinenzprodukte.

Heike betreut eine Person mit Inkontinenz. Sie kauft Inkontinenzprodukte für ihren Schützling. Sie ist aber nicht sicher, ob die Hilfsmittel richtig an dessen Bedürfnisse angepasst sind.

Die SeniControl App hilft Heike, die Inkontinenzstufe des Gepflegten zu bestimmen und das optimale Produkt zu finden.

Anna und Michael haben jetzt alles wieder unter Kontrolle und genießen jeden Tag.

Heike kann mit der App mehrere Personen in der Pflege begleiten und hat dadurch die volle Kontrolle.

Jetzt kostenlos herunterladen!



Wie wählen Sie das richtige Inkontinenzprodukt?

1 Bestimmen Sie den Schweregrad der Inkontinenz

Harninkontinenz wird nach den Urinmengen, die in einem Zeitraum von 4 Stunden abgehen in Schweregrade eingeteilt. Beobachten Sie einige Tage wie oft es zum Harnverlust kommt und wie viel Urin unkontrolliert abgeht.

Markieren Sie den passenden Schweregrad:



LEICHTE
INKONTINENZ



gelegentlicher
Urinverlust
zwischen
den Toilettenbesuchen



MITTLERE
INKONTINENZ



regelmäßiger
und starker
Urinverlust



SCHWERE
INKONTINENZ



regelmäßiger, starker
und unkontrollierter
Urinverlust

Liegt auch
Stuhlinkontinenz
vor?



NEIN

2 Bestimmen Sie die körperliche Verfassung des Betroffenen



MOBIL



bewegt sich
selbständig, führt
ein aktives Leben



BEDINGT MOBIL



bewegt sich in
einem Rollstuhl oder
mit einer Gehhilfe




NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG



3 Wählen Sie die passende Produktgröße

Messen Sie mit einem Maßband den Taillen- und Hüftumfang und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.

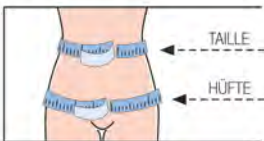

TAILLE

HÜFTE



Passende Größe

Beispiel: Inkontinenzhosen Super Seni

Befinden sich Taillen- und Hüftumfang im gleichen Größenbereich, wählen Sie die Größe folgendermaßen aus:

Befinden sich Taillen- und Hüftumfang in zwei verschiedenen Größenbereichen, wählen Sie die Größe anhand des höheren Wertes:



TAILLE

HÜFTE

92

104

Medium
Passende Größe



97

120

Large
Passende Größe



Inkontinenzslips

Maße in cm	Größe
55-85	(1) small
80-110	(2) medium
100-135	(3) large
120-160	(4) extra large



Inkontinenzhosen

Maße in cm	Größe
40-60	(0) extra small
55-80	(1) small
75-110	(2) medium
100-150	(3) large
130-170	(4) extra large



Inkontinenzvorlagen
mit Hüftbund

Maße in cm	Größe
70-105	(2) medium
80-125	(3) large
105-155	(4) extra large

Für jedes Bedürfnis das passende Produkt

		 MOBIL bewegt sich selbständig, führt ein aktives Leben	ODER	 BEDINGT MOBIL bewegt sich in einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe	 NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG
 LEICHT	Seni Lady Micro, Mini, Mini Plus, Normal, Extra   		Seni Man Normal, Extra   		San Seni Prima  
	Seni Lady Super, Plus   		Seni Man Super   		San Seni Prima, Normal, Regular   
	San Seni Prima, Normal, Regular   		Super Seni  		Seni Optima  
 MITTEL	Seni Active Normal  				
		 MOBIL bewegt sich selbständig, führt ein aktives Leben	 BEDINGT MOBIL bewegt sich in einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe	 NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG	
 SCHWER	San Seni Uni, Maxi, Plus, Plus Extra   		San Seni Uni, Maxi, Plus, Plus Extra   		San Seni Uni, Maxi, Plus, Plus Extra   
	Seni Active Plus  		Super Seni Super Seni Plus Super Seni Trio Super Seni Quatro   		Super Seni Super Seni Plus Super Seni Trio Super Seni Quatro   
	Seni Active Seni Active Plus  		Seni Optima Seni Optima Plus Seni Optima Trio  		Seni Optima Seni Optima Plus Seni Optima Trio  

Anlegetechnik der SENI-Produkte

Seni Lady



Seni Man

Normal, Extra



Super



Seni Active Normal / Seni Active / Seni Active Plus



Seni Soft Super Dry / Seni Soft

40 x 60
60 x 60
90 x 60




90 x 60
+ Seitenflügel




Wichtig!


Vor dem Anlegen soll die anatomische Form des Produktes wiederhergestellt werden:

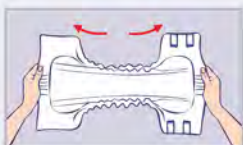

San Seni San Seni Alvi

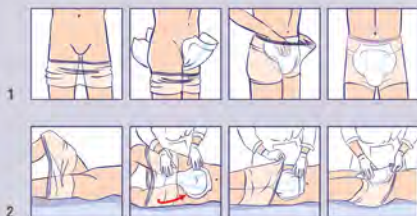

Super Seni Super Seni Plus Super Seni Trio Super Seni Quatro

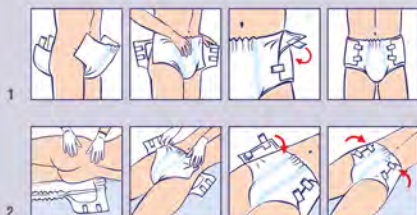

Seni Optima Seni Optima Plus Seni Optima Trio



Sortimentsübersicht – Produkte für jede Inkontinenzstufe

1  SENI LADY  MICRO	2  SENI LADY  MINI	2,5  SENI LADY  MINI PLUS	3  SENI LADY  NORMAL
		SENI MAN  NORMAL	
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  SAN SENI  PRIMA 32,5×61	 1 2 3 4 5 6 7 8 9  SAN SENI  NORMAL 32×62,5	 1 2 3 4 5 6 7 8 9  SAN SENI  REGULAR 37×69	 1 2 3 4 5 6 7 8 9  SAN SENI  UNI 32×62,5
			SUPER SENI  XS S M L XL
			SENI OPTIMA  M L XL
		SENI ACTIVE NORMAL  S M L XL	SENI ACTIVE SUPER  S M L XL
SAN SENI ALVI 		SENI SOFT SUPER DRY / SENI SOFT 40×60 60×60 90×60 90×60 + Seitentügel 	

Premium Quality Versorgung



SENI LADY



EXTRA



SENI LADY



SUPER



SENI LADY



PLUS

SENI MAN



EXTRA

SENI MAN



SUPER



SAN SENI



MAXI 37x69



SAN SENI



PLUS 37x69



SAN SENI



PLUS EXTRA 39x75

SUPER SENI PLUS



XS S M L XL

SUPER SENI TRIO



S M L XL

SUPER SENI QUATRO



S M L XL

SENI OPTIMA PLUS



M L XL

SENI OPTIMA TRIO



M L XL

SENI ACTIVE PLUS




S M L XL

ZUSATZANGEBOT



PFLEGEPRODUKTE SENI CARE



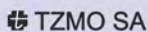

TZMO SA

tzmo-global.com
seni-global.com

TZMO Deutschland GmbH, Waldstrasse 2, D-16359 Biesenthal
Tel. 03337/451329-0 Fax 03337/451329-99
info@tzmo.de www.seni.de www.tzmo.de www.tzmo.at



Für weitere Informationen wenden Sie sich an: